

Lephademodex[®]

Este producto es un producto sanitario. Lea las instrucciones de uso antes de utilizarlo.
Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.

INDICACIONES

LEPHADEMODEX es una toallita estéril impregnada con una loción para la higiene diaria de los párpados cuando hay infección por *Demodex*.

Solo para uso cutáneo, no aplicar directamente en los ojos.

APTO PARA

Solo adultos.

CONTRAINDICACIONES

No utilice LEPHADEMODEX si es alérgico a cualquiera de sus ingredientes (ver *Descripción del producto*).

Al no disponer de suficientes datos, no utilice LEPHADEMODEX, si está embarazada o en periodo de lactancia a menos que lo indique su médico.

Al no disponer de suficientes datos, LEPHADEMODEX no debe ser usado en niños a menos que lo indique su médico.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LEPHADEMODEX es una toallita estéril impregnada con una loción.

Contenido de la loción: PEG-8, Polisorbato 80, Poloxámero 184, Terpinen-4-ol, PEG-6 glicéridos caprílicos/cápricos (Macrogol 6 glicerol capril caproato), hialuronato de sodio, fosfato dipotásico, dihidrógeno fosfato de potasio, agua purificada.

LEPHADEMODEX no contiene detergentes agresivos ni contiene conservantes. LEPHADEMODEX tiene un aroma fresco debido a los ingredientes naturales; se disipa unos minutos después de su aplicación.

El color de la toallita puede variar. Esto se debe a los extractos vegetales naturales (Terpinen-4-ol, un extracto purificado del aceite del árbol de té) y es normal.

BENEFICIOS, FUNCIÓN Y MECANISMO DE ACCIÓN

LEPHADEMODEX está recomendado:

- para la higiene diaria de los párpados cuando hay infección por *Demodex*,
- para aliviar los síntomas de infección o inflamación del párpado (blefaritis) causada por *Demodex*.

Demodex es el parásito microscópico más común de la piel pero cuando se encuentran en exceso puede producir irritación, ardor, dolor de párpados, enrojecimiento del borde palpebral y sensación de cuerpo extraño. La presencia de collarettes, los cuales se encuentran en la base de las pestañas, es un fuerte indicador de infección por *Demodex*.

No se elimina *Demodex* mediante productos de limpieza diaria y se requiere un tratamiento específico.

LEPHADEMODEX elimina costras, caspa, impurezas y agentes infecciosos en párpados y pestañas.

LEPHADEMODEX mejora los síntomas asociados a infección por *Demodex*, como picor, ardor, sequedad e inflamación del borde palpebral. Se reduce el

enrojecimiento palpebral y la sensación de cuerpo extraño. Contiene hialuronato de sodio, agente hidratante natural, el cual suaviza y regenera la piel sensible.

LEPHADEMODEX se tolera bien.

El producto se ha testado bajo control oftalmológico.

RECOMENDACIONES GENERALES DE USO

Dosis:

- Síntomas leves a moderados: Usar una vez al día, preferiblemente por la noche durante 4 semanas.
- Síntomas moderados a graves: Usar dos veces al día, mañana y noche durante 4 semanas.

Su profesional sanitario puede modificar la posología y la duración del tratamiento según la gravedad de los síntomas.

Como en otros tratamientos similares para blefaritis, su profesional sanitario puede recomendarle también el uso simultáneo de lágrimas artificiales.

No se requiere una formación particular para usar LEPHADEMODEX.

Si utiliza lentes de contacto: debe retirarlas antes de usar LEPHADEMODEX.

Lavarse las manos meticulosamente antes de usar las toallitas.

Abrir el sobre por la ranura (Figura 1) y desplegar la toallita del interior; no utilizar ninguna herramienta para abrir el sobre.

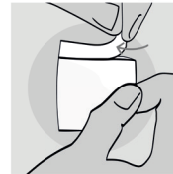


Figura 1: Apertura del sobre

Enrollar la toallita en la punta del dedo índice.

Con el ojo cerrado, aplicar con suavidad la toallita sobre los párpados y en la base de las pestañas (Figura 2).

Efectuar un suave masaje realizando pequeños movimientos circulares para eliminar costras o secreciones.



Figura 2:

Limpieza de sus párpados y pestañas

Repetir en el otro ojo, usando una toallita nueva.

LEPHADEMODEX es no graso y no precisa ser aclarado después de usar las toallitas.

Mantener los ojos cerrados durante 15 segundos después de su uso.

PRECAUCIONES DE USO

Comprobar que el embalaje está intacto antes del primer uso: usar solo si el sobre está sin abrir.

No utilizar ninguna toallita más de una vez, ya que puede no funcionar correctamente y puede producirse contaminación.

Contacte con un profesional sanitario si sus síntomas empeoran o no mejoran.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños. Evitar que LEPHADEMODEX entre en contacto con los ojos; puede experimentar sensación de ardor. Si esto sucede, aclarar con abundante agua limpia o solución salina.

EFFECTOS ADVERSOS

Se han notificado los siguientes efectos adversos: ardor después de su uso.

En tales casos, los usuarios de lentes de contacto no deben volver a ponerse las lentes de contacto.

Si experimenta cualquier efecto adverso o sensación inusual tras usar este producto, contacte con un profesional sanitario e informe al distribuidor local, al fabricante o a sus Autoridades Sanitarias locales (ver contactos al final de las instrucciones de uso).

CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE ELIMINACIÓN

Conservar entre 8°C y 25°C.

No exponer el producto directamente a la luz solar ni a la humedad.

Desechar la toallita inmediatamente después de su uso. No utilizar después de la fecha de caducidad claramente indicada en el sobre y en el embalaje.

La fecha de caducidad corresponde al último día del mes indicado siempre que el embalaje esté intacto y se haya almacenado correctamente.

Deseche el producto de forma responsable y de acuerdo con la normativa local (el sobre y la toallita deben desecharse como basura doméstica, el embalaje exterior y el prospecto son reciclables).

Fecha de emisión y versión de las instrucciones de uso: 08/2020 Ver. 3

Fabricante:



Laboratoires Théa
12 rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand
Cedex 2 Francia

www.laboratoires-thea.com

Sección « Contact us »

Distribuidor:

Laboratorios Théa, S.A.

C/ Enric Granados nº 86-88, 2ª planta

08008 Barcelona – España

www.laboratoriossthea.com

Sección "Contacto" de la página Web

Autoridades Sanitarias


Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

C/ Campezo 1, Edificio 8, ES - 28022 Madrid

e-mail: sgps@aemps.es - <http://www.aemps.gob.es/>

 0459

SIGNIFICADO DE LOS PICTOGRAMAS EN EL EMBALAJE

	Fabricante
	Número de lote
	Fecha de fabricación
	Fecha de caducidad
	Límites de temperatura
	Esterilizado por irradiación
	Producto sanitario
	Consultar las instrucciones de uso
	Un solo uso
	No utilizar si el embalaje está dañado
	Precaución