

Lephanet®

Este producto es un producto sanitario. Lea las instrucciones de uso antes de utilizarlo. Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.

INDICACIONES

LEPHANET está indicado para la higiene diaria de los párpados.

Solo para uso cutáneo, no aplicar directamente en los ojos.

APTO PARA

- Adultos,
- Niños a partir de 3 meses: los padres o los cuidadores deben administrarles el producto

CONTRAINDICACIONES

No utilice LEPHANET si es alérgico a cualquiera de sus ingredientes (ver *Descripción del producto*).

Al no disponer de suficientes datos, no utilice LEPHANET, si está embarazada o en periodo de lactancia a menos que lo indique su médico.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LEPHANET es una toallita estéril impregnada con una loción para la higiene diaria de los párpados.

Contenido de la loción: capriloilglicina, hialuronato sódico, PEG 8, poloxámero 184, polisorbato 20, propilenglicol, extracto de hidrocotilo (propilenglicol, extracto de Centella asiática y agua), complejo seborregulador sin conservantes (propilenglicol, extracto de raíz de Iris florentina, sulfato de zinc, alcohol, hidróxido de sodio o ácido clorhídrico y agua), PEG 6 glicéridos caprílicos/cápricos (caprilocaprato de macrogol-6-glicerol), fosfato dipotásico, hidróxido de sodio, dihidrógeno fosfato de potasio, agua purificada.

El color de la toallita puede variar. Esto se debe a los extractos vegetales naturales y es normal.

BENEFICIOS, FUNCIÓN Y MECANISMO DE ACCIÓN

LEPHANET es una toallita estéril para la higiene diaria de los párpados:

- En caso de pieles, párpados u ojos sensibles
- Cuando necesita eliminar polvo, polen y secreciones de los párpados. Puede formar parte del cuidado habitual en caso de alergia o infección ocular;
- Cuando tiene inflamación o infección de los párpados, como blefaritis, disfunción de las glándulas de Meibomio, orzuelos o chalazión. Estas afecciones pueden causar síntomas de ojo seco como picor, sensación de arenilla, dolor o enrojecimiento ocular;
- Cuando necesita limpiar los párpados antes de un procedimiento oftálmico, como inyecciones terapéuticas en el ojo (inyecciones intravítreas), cirugía láser ocular (LASIK o PRK) y cirugía de catarata. Gracias a su buena tolerabilidad, LEPHANET también puede utilizarse después de la cirugía, según las indicaciones del médico u oftalmólogo.

LEPHANET limpia y elimina el polvo, el polen y las secreciones de los párpados.

LEPHANET respeta la piel alrededor de los ojos y su flora bacteriana natural.

El producto se ha testado bajo control oftalmológico.

RECOMENDACIONES GENERALES DE USO

Dosis:

Antes de la cirugía ocular, utilizar **dos veces al día** durante 5 días o siguiendo las indicaciones de su médico o farmacéutico.

En los demás casos, utilizar **dos veces al día** por la mañana y por la noche durante 3 semanas y, a partir de entonces, una vez al día durante 3 meses o siguiendo las indicaciones de su médico o farmacéutico. Algunas afecciones palpebrales son crónicas, por lo que puede ser necesario continuar con la higiene de los párpados a largo plazo.

No se necesita una formación particular para utilizar LEPHANET.

Si utiliza lentes de contacto: debe retirarlas antes de usar LEPHANET.

Lavarse las manos meticulosamente antes de usar las toallitas.

Abrir el sobre por la ranura (Figura 1) y desplegar la toallita del interior; no utilizar ninguna herramienta para abrir el sobre.



Figura 1: Apertura del sobre.

Enrollar la toallita en la punta del dedo índice.

Con el ojo cerrado, aplicar con suavidad la toallita sobre los párpados y en la base de las pestañas (Figura 2).

Efectuar un suave masaje en los párpados realizando pequeños movimientos circulares para eliminar costras, secreciones o maquillaje.



Figura 2: Limpieza de sus párpados y pestañas.

Frente a un espejo, con la otra mano, tirar suavemente hacia abajo del párpado inferior y luego frotar el borde palpebral con el dedo que tiene la toallita enrollada a su alrededor (Figura 3).

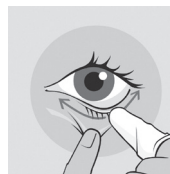


Figura 3: Limpieza del borde palpebral.

Repetir la operación en el otro ojo, usando una toallita nueva.

No precisa aclarado después de usar las toallitas LEPHANET.

PRECAUCIONES DE USO

Comprobar que el embalaje está intacto antes del primer uso: usar solo si el sobre está sin abrir.

No utilizar ninguna toallita más de una vez, ya que puede no funcionar correctamente y puede producirse contaminación.

Contacte con un profesional sanitario si sus síntomas empeoran o no mejoran.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños. Evitar que LEPHANET entre en contacto con los ojos; puede experimentar sensación de ardor. Si esto sucede, aclarar con abundante agua limpia o solución salina.

EFFECTOS ADVERSOS

Se han notificado los siguientes efectos adversos con LEPHANET: ardor o irritación ocular durante unos minutos después de su uso, enrojecimiento o hinchazón de los párpados, enrojecimiento ocular, reacciones alérgicas. En tales casos, los usuarios de lentes de contacto no deben volver a ponerse las lentes de contacto.

Si experimenta cualquier efecto adverso o sensación inusual tras usar este producto, contacte con un profesional sanitario e informe al distribuidor local, al fabricante o a sus Autoridades Sanitarias locales (ver contactos al final de las instrucciones de uso).

CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE ELIMINACIÓN

Conservar entre 8°C y 25°C.

No exponer el producto directamente a la luz solar ni a la humedad.

Desechar la toallita inmediatamente después de su uso. No utilizar después de la fecha de caducidad claramente indicada en el sobre y en el embalaje.

La fecha de caducidad corresponde al último día del mes indicado siempre que el embalaje esté intacto y se haya almacenado correctamente.

Deseche el producto de forma responsable y de acuerdo con la normativa local (el envase debe desecharse como basura doméstica, el embalaje exterior y el prospecto son reciclables).

Fecha de emisión y versión de las instrucciones de uso:
08/2022 Ver. 5

Fabricante:



Laboratoires Théa
12 rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand
Cedex 2 Francia

www.laboratoires-thea.com

Sección «Contact us»

Distribuidor:

Laboratorios Théa, S.A.
C/ Enric Granados nº 86-88, 2ª planta
08008 Barcelona – España
www.laboratoriossthea.com
Sección “Contacto” de la página Web

Autoridades Sanitarias

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
C/ Campezo 1, Edificio 8, ES - 28022 Madrid
e-mail: sgps@aemps.es - <http://www.aemps.gob.es/>

CE 0459

SIGNIFICADO DE LOS PICTOGRAMAS EN EL EMBALAJE

	Fabricante
	Número de lote
	Fecha de fabricación
	Fecha de caducidad
	Límites de temperatura
	Esterilizado por irradiación
	Producto sanitario
	Consultar las instrucciones de uso
	Un solo uso
	No utilizar si el embalaje está dañado
	Precaución
	No exponer a la luz solar
	Mantener seco
	Número de catálogo
	Identificador único del producto

Théa

N1179LC42L01/X1022 -XXXX